


Wzornik rozmiarów

Instrukcja:

- 1 Wydrukuj szablon PDF w widoku w skali 100%. Użyj wskaźnika dokładności po prawej stronie, by upewnić się, że wzornik został wydrukowany we właściwym rozmiarze.
- 2 Następnie zagnij dolną część strony wzdłuż przerywanej linii.
- 3 Wytnij wzornik znajdujący się po prawej stronie wzdłuż kropkowanej linii.
- 4 Umieść szablon dopasowania pod nosem tak, jak pokazano na obrazku.
- 5 Określ właściwy rozmiar, odczytując literkę zamieszczoną przy linii, do której sięga Twój nos. (S - mały, M - średni, L - duży)

Philips Respironics zawsze zaleca skonsultowanie się z lekarzem lub certyfikowanym terapeutą snu w celu dobrania właściwego rodzaju maski.

Amara View

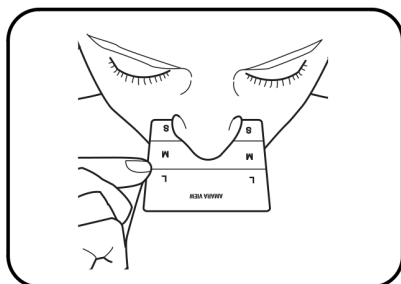

Zagnij wzdłuż przerywanej linii

Kontrola skali wydruku



Szablon dopasowania

Tnij wzdłuż kropkowanej linii

